

schülke -†



Non-invazív orvostechnikai eszközök és felületek gyors, alkoholalapú fertőtlenítése és tisztítása

terralin[®] AF wipes

Előnyök

- széles hatásspektrum nagyon rövid behatási idő alatt
- maradványmentes száradás
- felhasználásra kész

Felhasználási terület

A termék alkalmas orvosi eszközök és egyéb felületek fertőtlenítésére. Klasszikus termékünk a gyors felületfertőtlenítők közül alkalmas olyan betegközeli, fertőzésveszélynek fokozottan kitett felületek fertőtlenítésére, ahol követelmény a rövid behatási idő.

Mikrobiológiai hatásspektrum*

Hatásspektrum	Behatási idő
baktericid (MRSA), yeasticid, tuberkulocid/miko- baktericid, szelektív virucid (noro-, adeno-, rota-és burkos vírusok)	1 perc
fungicid	2 perc
<i>Polyoma SV40</i> hatás	5 perc

*NNGYK/02616/2024 engedély alapján

CE



Termék adatok

Összetétel:

100g oldat hatóanyag tartalma:
23,265 g Etanol, 35 g 1-Propanol

Kémiai/fizikai adatok

Szín:	színtelen
Sűrűség	kb.0,89 g/cm ³ / 20 °C /aktív oldatra vonatkozóan
Lobbanáspont	27 °C / DIN 51755 / 1 szerint /aktív oldatra vonatkozóan
Megjelenés	vizes, alkoholtartalmú oldat nem szőtt anyagon nem alkalmazható
pH	nem alkalmazható
Viszkózitás,dinamika	nincs meghatározva

Speciális ajánlás

Biztonságosan használja a fertőtlenítőszeret! Mindig olvassa el a termékcímkét és terméktájékoztatót használat előtt!

A termék jó anyagkompatibilitással rendelkezik fémekkel és műanyagokkal (kivéve akrilüveg és alkoholérzékeny festékekkel). Az alkoholra különösen érzékeny felületeket, mint például az akrilüveg, nem szabad a termékkel kezelni. Kérjük kövesse a tűzvédelmi előírásokat, amikor alkohol tartalmú fertőtlenítőszer alkalmaz! Tartsa hőtől és hőforrástól távol. Védőkesztyű viselése ajánlott. Más tisztító- és fertőtlenítőszerrel együtt használni tilos! További információ kérésre elérhető A megfelelő kezelés esetén schülke garanthatja a termék 3 hónapos felhasználhatóságát a felnyitást követően. Kizárólag professzionális felhasználásra. A termékkel kapcsolatos minden súlyos eseményt jelenteni kell a gyártónak és az illetékes hatóságnak. Nem alkalmas szemikritikus és kritikus orvostechnikai eszközök végső fertőtlenítésére!

Használati útmutató

Törölje át a termékkel a fertőtlenítenő felületet/tárgyat úgy, hogy kezeletlen részec ne maradjanak, majd a megfelelő hatáshoz **szükséges behatási idő** letelte után hagyja megszáradni vagy törölje szárazra.

A behatási idő alatt a felület nedves állapotban kell tartani. Használat után a fedelet szorosan zárja vissza.

Fertőtlenítés előtt győződjön meg róla, hogy minden látható szennyeződés eltávolításra került. Csak kis területeket kezeljen. A letörölhető felület nagysága függ a szoba hőmérsékletétől és a fertőtlenítenő felület struktúrájától. Biztosítsa a higiénés követelmények betartását a felnyitáskor és az első kendő kivételekor.

Rendelési információ

Kiszerezési egységek	Csom.egység	Cikkszám
200 db-os doboz	6db/karton	70003671

Környezetvédelmi információ

schülke a termékeit fejlett, biztonságos és környezetbarát módszerekkel, a gazdasági és fenntarthatósági legmagasabb minőségi sztenderdeknek megfelelően állítja elő.

További információ

Kérjük, látogassa meg weboldalunkat vagy keresse vevőszolgálatunkat, amennyiben további információra van szüksége.

www.allegro.hu

Vevőszolgálat: tel.:
+36 1 350 2107
e-mail: info@allegro.hu



Schülke & Mayr GmbH holds a Manufacturer's Authorisation according to sect 13 para 1 German Drug Law and Certificates of GMP Compliance for medicinal products.

schülke Headquarters
Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Str. 2
22851 Norderstedt, Germany
Phone+4940-52100-0
Fax+4940-52100-318
www.schuelke.com
info@schuelke.com



1045 Budapest,
Berlini utca 47-49.
tel.: +36 1 350 2107
fax: +36 1 329 1854
e-mail:info@allegro.hu
www.allegro.hu